

PLEXTALK®



PLEXTALK PTN2 Cross


PLEXTALK PTN2

Pocket guide voor de PLEXTALK PTN2 spelers (PTN2 Cross en PTN2 Standaard)
[Nederlands]

Pocket guide voor de PLEXTALK PTN2 spelers (PTN2 Cross en PTN2 Standaard)

1. Toetsen met de afdekplaat

(Opmerking: Toetsen naar boven, beneden, links en rechts zijn niet zichtbaar op de standaard versie van de PTN2)

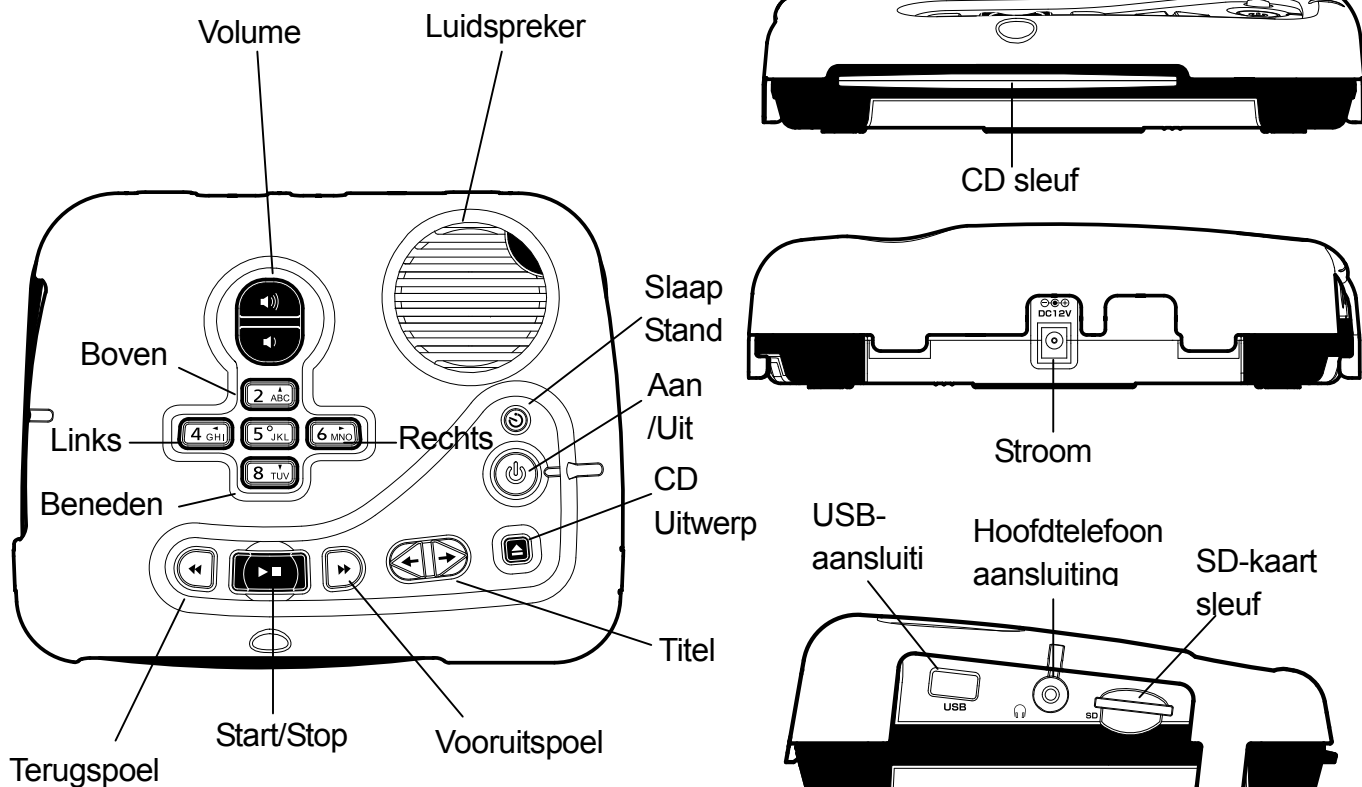

2. Beschrijving van de PLEXTALK PTN2

- De Luidspreker bevindt zich rechts boven aan de voorkant van het toestel
- Onder de luidspreker bevinden zich 4 toetsen: slaapstand, Aan/Uit toets, de CD-eject toets en de brede titel toets.
- In het midden bovenaan het toestel zit links de volume toets
- Aan de onderkant in het midden staan de terugspoel toets, de Start/Stop toets en de doorspoeltoets
- Aan de achterzijde van het toestel is de aansluiting voor de stroom adaptor
- Aan de linkerzijde bevindt zich het SD-kaart slot, de hoofdtelefoonaansluiting en een USB aansluiting
- Aan de voorkant zit het slot om een CD te laden.

3. Toets Beschrijving

- **Aan/Uit Toets:** Zet de PTN2 uit door 2 seconden op de Aan/Uit te drukken
- **Slaapstand Toets:** om de slaapstand in te stellen, druk deze toets om van 15 minuten tot 1 uur slaapstand te kiezen.
- **Eject Toets:** om een CD uit de PTN2 te halen



- **Titel Toets:** Druk naar rechts om naar de volgende titel te gaan of naar links om de voorgaande titel te kiezen. Als je op deze toets blijft duwen selecteer je ook CD , SD of USB medium.



- **Volume Toets:** Druk naar omhoog om het volume harder te zetten, naar omlaag om het volume zachter te zetten



- **Toets naar boven/Beneden:** druk op een van de toetsen om het niveau te kiezen.

- **Links/rechtse toetsen:** druk op links om terug te keren, op rechts om verder te gaan.



- **Terugspoel Toets:** Druk eenmaal om naar de vorige zin te gaan in een Daisy boek, vorige track in een audio bestand, of de vorige paragraaf in een tekst bestand. Bij het ingedrukt houden spoel je terug in tijd.



- **Start/Stop Toets:** om het afspelen te starten en te stoppen



- **Doorspoel Toets:** Druk kort om naar een volgende zin te gaan in een Daisy titel, naar een volgende track in een audio bestand, of naar een volgende paragraaf in een tekst bestand. Hou deze toets ingedrukt oom door te spoelen in tijd.



4. Voorbeelden

Een Daisy boek afspelen op CD

- Steek de CD in het CD-slot vooraan in de PTN2.
- En het afspelen begint.
- Druk de Start/Stop toets om het afspelen te stoppen.
- Druk en hou de doorspoeltoets ingedrukt om door te spoelen.
- Druk en hou de terugspoeltoets ingedrukt om terug te spoelen in tijd.
- Druk de 2 of 8 toets om het navigatie niveau te selecteren en gebruik Toets 4 of 6 om in het geselecteerde niveau terug of vooruit te gaan. (Opmerking: De naar boven, beneden, links of rechtse toetsen zijn niet zichtbaar op de standaardversie van de PTN2)




Audio of muziek afspelen

- Druk links of rechts van de titel toets om de audio bestanden te selecteren end daarna op Start/stop. Je kan met de terugspoel- of doorspoeltoets de vorige of volgende track kiezen




5. Hoe de afdekkap te verwijderen?

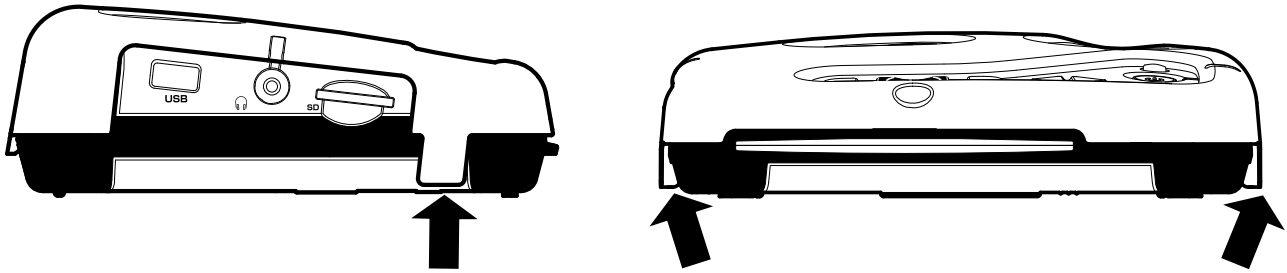

- Neem de afdekkap vast met de wijsvingers aan de onderzijde.
- Neem de afdekkap voorzichtig van de PTN2 speler.

6. Toetsen zonder de Afdekplaat

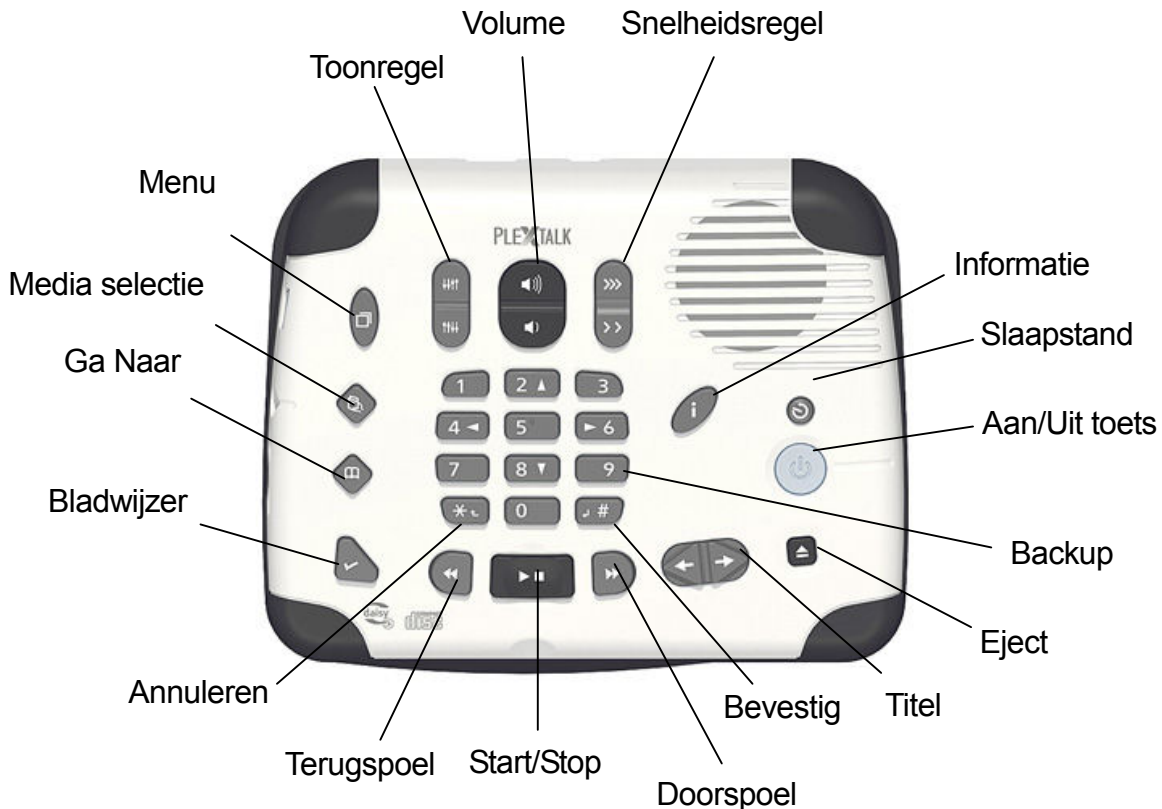

7. Beschrijving van de PLEXTALK PTN2

- De Luidspreker bevindt zich rechts boven aan de voorkant van het toestel
- Onder de luidspreker bevinden zich 4 toetsen: slaapstand, Aan/Uit toets, de CD-eject toets en de brede titel toets
- In het midden bovenaan het toestel zit links de toonregel toets, de volume toets en de snelheids regel toets
- In het midden van het toestel bevindt zich een numeriek toetsenbord met daaronder de terugspoel toets, de Start/Stop toets en de doerspooeltoets
- Aan de linkerkant staan vier toetsen: Menu, Media selectie, Ga naar- en bladwijzer toets
- Aan de achterzijde van het toestel is de aansluiting voor de stroom adaptor
- Aan de linkerkant bevindt zich het SD-kaart slot, de hoofdtelefoonaansluiting en een USB aansluiting
- Aan de voorkant zit het slot om een CD te laden.

8. Toets Beschrijving

- **Aan/Uit Toets:** Zet de PTN2 uit door 2 seconden op de Aan/Uit te drukken
- **Slaap stand Toets:** om de slaapstand in te stellen, druk deze toets om van 15 minuten tot 1 uur slaapstand te kiezen
- **Eject Toets:** Om een CD uit te werpen
- **Informatie Toets:** Hiermee kan je informatie over de batterij en titel mee opvragen.
- **Titel Toets:** Druk naar rechts om naar de volgende titel te gaan of naar links om de voorgaande titel te kiezen. Als je op deze toets blijft duwen selecteer je ook CD , SD of USB medium
- **Toonregel Toets:** Druk omhoog voor hogere tonen, naar omlaag om meer bass geluid te kiezen.
- **Volume Toets:** Druk naar omhoog om het volume harder te zetten, naar omlaag om het volume zachter te zetten
- **Snelheidsregel Toets:** Druk naar boven om sneller af te spelen, naar omlaag om trager te spelen.
- **De 9 Toets:** Om een backup te starten van een titel op CD, SD of USB naar een SD-of een USB- medium.
- **De 0 Toets:** Om de helpfunctie aan te zetten. Dit is de ingebouwde handleiding weergegeven in Daisy formaat.
- **Sterretje:** Om je selectie te annuleren, ka nook bij het menu worden gebruikt.
- **Hekje:** om zaken te bevestigen indien dit wordt gevraagd, ka nook bij het menu worden gebruikt..
- **Terugspoel Toets:** Druk eenmaal om naar de vorige zin te gaan in een Daisy boek, vorige track in een audio bestand, of de vorige paragraaf in een tekst bestand. Bij het ingedrukt houden spoel je terug in tijd..
- **Start/Stop Toets:** Om het afspelen te starten en te stoppen.
- **Doorspoel Toets:** Druk kort om naar een volgende zin te gaan in een Daisy titel, naar een volgende track in een audio bestand, of naar een volgende paragraaf in een tekst bestand. Hou deze toets ingedrukt oom door te spoelen in tijd.



- **Menu Toets:** In het Menu kan je kiezen tussen afspeel instellingen, Over te slaan, Media beheer en Systeem instellingen. Hou de menu toets ingedrukt voor 10 seconden om de toets beschrijvings mode aan te zetten
- **Media keuze Toets:** Druk deze toets om te kiezen tussen CD, SD of USB
- **Ga Naar Toets:** Om direct naar een pagina te gaan in een Daisy Boek, een track in een album of percentage in een tekst.
- **Bladwijzer Toets:** druk eenmaal om naar een bladwijzer te gaan, druk tweemaal om een nieuwe bladwijzer te maken, druk driemaal om een bladwijzer te verwijderen.



9. Voorbeelden

Muziek of Audio afspelen

- Druk links of rechts op de titel toets om het audio bestand of album te selecteren gevolgd door de Start/Stop toets.
- Je kan direct naar een track of album gaan door de Ga Naar toets te drukken gevolgd door een cijfer.



Afspelen van een tekst of MS Word DOC bestand:

- Kopier het bestand op een SD-kaart of USB-stick.
- Selecteer het tekst bestand met de titel toets.
- Druk de Start/Stop toets om het afspelen te starten.
- Een synthetische stem leest de tekst voor.
- Het navigeren in een tekst of Word bestand kan per zinsdeel, word, karakter enz. Dit met behulp van de toetsen 2, 4, 6 en 8.



Het maken van een backup van een SD card naar een USB stick

- Steek de memory stick in het USB slot.
- Selecteer een titel op de SD-kaart.
- Druk de 9 toets om de backup te starten. Volg de audio instructies.

Het maken van een backup van de USB memory stick of CD naar SD Kaart.

- Selecteer een titel op de USB memory stick of CD
- Druk de 9 toets om de backup te starten naar de SD kaart en volg de audio instructies.



10. Menu Structuur

Afspeel-instelling

- Schuifel -en herhaal instellingen
 - Standaard afspelen
 - Titel herhalen (DAISY, tekst, audio boek)
 - Track herhalen (Luisterbestanden)
 - Album herhalen (Luisterbestanden)
 - Alle albums herhalen (Luisterbestanden)
 - Willekeurig herhalen (Luisterbestanden)
- Lezen van audio bestands naam
 - Lees audio bestands naam
 - Lezen van audio track nummer

Over te slaan:

- Selecteer paginanummer
 - Afspelen
 - Overslaan
- Voetnoot selecteren
 - Afspelen
 - Overslaan
- Selecteer referenties
 - Afspelen
 - Overslaan
- Selecteer bijschrift
 - Afspelen
 - Overslaan
- Selecteer regelnummer
 - Afspelen
 - Overslaan
- Keuzelijst selecteren
 - Afspelen
 - Overslaan
- Selecteer bericht van de producent
 - Afspelen
 - Overslaan

Media-beheer:

- Medium en titel informatie
- Verwijderen van alle bestanden van de sd-kaart
- Geselecteerde titel verwijderen (Geselecteerde album verwijderen)

Systeem-instellingen:

- Systeemeigenschappen
 - Systeemversie
 - Serienummer
 - Ge-installeerde sleutel (indien beschikbaar)
- Kies volume voor begeleiding (Op schaal van -5 tot +5)
- Selecteer de synthetische stem
 - nederlandse taal
 - engelse taal
- Selecteer het wachtgeluid
 - Wachtgeluid 1
 - Wachtgeluid 2
 - Geen wachtgeluid
- Instellen van datum en tijd
- Selecteer de toonhoogte van de synthetische stem (Op schaal van -5 tot +5)
- Alle instellingen op standaard zetten

SHINANO KENSHI CO., LTD.
<http://www.plextalk.com/>
December 2011