

SNELLE REFERENTIEGIDS VOOR HET AANRAAKSCHERM



SNELLE REFERENTIEGIDS AFSTANDSBEDIENING



Voor hulp en ondersteuning belt u

088-6783514

Of stuur een e-mail naar
support@optelec.nl



MEER HANDIGE TOETSENCOMBINATIES

Sneltoetsen voor menu's	
Volgend item	PIJL-OMHOOG / RECHTS
Vorig item	PIJL-OMHOOG / LINKS
Open item	ENTER
Terug naar vorig scherm	ESCAPE
Help	F1
Acties	F2
Help & Informatie	F3
Lees het huidige item	F4
Spraak onderbreken	CTRL

Sneltoetsen voor schrijven	
Volgend / vorig woord	CTRL + PIJL-RECHTS/LINKS
Tekst selecteren	SHIFT + PIJLTOETSEN
Geselecteerde tekst kopiëren	CTRL + C
Tekst plakken	CTRL + V
Volgend / vorig teken	PIJL-RECHTS / PIJL-LINKS

Sneltoetsen voor lezen	
Volgende / vorige regel	PIJL OMLAAG / OMHOOG
Voorlezen	F5
Pauze	CTRL

Sneltoetsen voor websites	
Volgend / vorig item	PIJL OMLAAG / OMHOOG
Volgend / vorig teken	PIJL-RECHTS / PIJL-LINKS
Volgend / vorig woord	CTRL + PIJL-RECHTS/LINKS
Toon afbeeldingen AAN / UIT	CTRL + I
Verander de weergavemodus	CTRL + T
Volgende kop	H
Volgend bewerkingsgebied	E
Volgende link	K
Terug naar vorige pagina	BACKSPACE



088-6783514

Als u meer hulp en ondersteuning nodig heeft met GuideConnect, bel dan

Vouw hier en plaats achter het toetsenbord

TOETSENBOORD SNEELTOETSEN GuideConnect

Ctrl +0	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12
Spraak Aan / Uit	Help	Acties	Help & infor- matie	Her- haal	Voor- lezen	~	Spraakvolume: verlagen / verhogen	Spraaksnelheid: verlagen / verhogen	Vergroting: verkleinen / vergroten			

Verwijder voorzichtig

Verwijder voorzichtig