
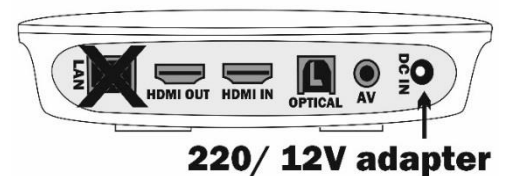


Snelstart handleiding FOXLINQ

Met deze eenvoudige handleiding kunt u de FOXLINQ snel aansluiten. U plaatst de FOXLINQ met de meegeleverde HDMI kabel tussen de zender-decoder (van bijv. Ziggo/ KPN/ etc.) en uw TV toestel.


FOXLINQ aansluiten vanaf de zender-decoder

1. De uit de zender-decoder afkomstige kabel naar de TV wordt aangesloten op de **HDMI IN** ingang van de FOXLINQ.
2. De (meegeleverde) HDMI kabel wordt in de **HDMI OUT** van de FOXLINQ gestoken en vervolgens aangesloten in de oorspronkelijke of vrije HDMI IN ingang van de TV.
3. Na deze handeling kunt u de netadapter aansluiten. De adapterplug sluit u aan door deze in de DC IN aansluiting op de achterzijde van de FOXLINQ te steken en de 220V netstroom adapter in het stop-contact steken.

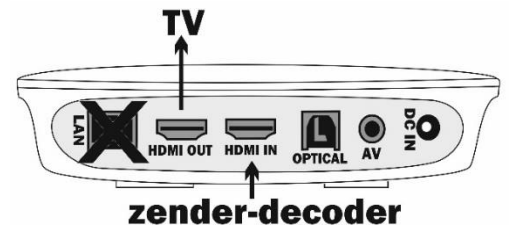

Rechtstreekse aansluiting via de HDMI kabel naar TV: GO is altijd in combinatie met het zendergeluid te horen via de luidsprekers van de TV of via een op de TV/ FOXLINQ aangesloten hoofdtelefoon.

De benodigde extra HDMI kabel bevindt zich in de verpakking.

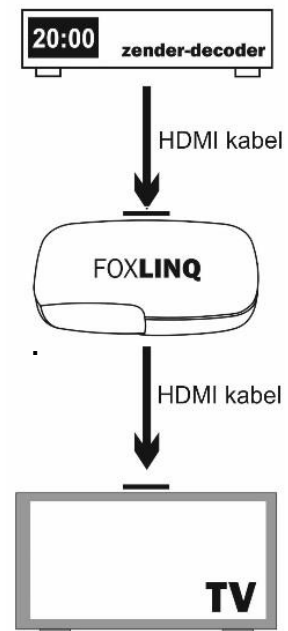

Als u extra luidsprekers wilt aansluiten op de FOXLINQ dienen deze voorzien te zijn van een 3.5mm stereo connector en een eigen 220V aansluiting. U kunt dan het volume van de luidsprekers van de TV onderdrukken.

