

GEBRUIKSAANWIJZING KEYS-U-SEE GROOTLETTER TOETSENBORD



Bedankt voor de aankoop van het Keys-U-See grootletter toetsenbord.

Systemeisen

Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista en XP en vrije USB-poort voor aansluiting

Installatie

Zorg ervoor dat de computer uitgeschakeld staat alvorens het toetsenbord aan te sluiten. Sluit vervolgens de USB kabel van het toetsenbord aan op een vrije USB-poort van de computer. Zet de computer weer aan en het toetsenbord kan worden gebruikt.

Verhogingspootjes

Om de polsen eventueel te ontlasten, kan er gebruik worden gemaakt van de uitklapbare pootjes die aan de onderzijde van het toetsenbord zitten.

Betekenis afkortingen

PS= Print Screen	SL= Scroll Lock	PB= Pause / Break
INS= Insert	HM= Home	PU= Page Up
DEL= Delete	PD= Page Down	NL= Num Lock

Functies multimedia toetsen

Dit grootletter toetsenbord is voorzien van twaalf multimedia toetsen. Deze toetsen bieden de volgende functies, van links naar rechts:

- Play / pauze; om audio of video te starten of te pauzeren
- Stop; om audio of video te stoppen
- Mute; voor weergave zonder geluid
- Volgende; ga naar het volgende nummer
- Vorige; ga naar het vorige nummer
- Volume omlaag (één knop in twee delen)
- Volume omhoog (één knop in twee delen)
- Slaapstand; computer in of uit de slaapstand
- Favorieten; open 'mijn favorieten'
- Zoeken; open zoekvenster
- E-mail; start het standaard e-mailprogramma
- Home; start de standaard webbrowser (meestal Internet Explorer)