

	Dolphin logo	Start het Regelpaneel van SuperNova
	Vraagteken	F1 Help
	Podcast symbool	Snelstart menu (podcasts, internet radio, enz.)
	Vierkant met blokken	Kleurverandering aan / uit
	Strepen	Focus markering aan / uit
	Vergrootglas	Vergroter aan / uit
	Plusteken	Vergroting verhogen (inzoomen)
	Minteken	Vergroting verlagen (uitzoomen)
	Scherm	Kies andere vergrotings modus
	ABC	Lichtkrant (druk Escape om te stoppen)
	Driehoek	Lees vanaf hier (druk Escape om te stoppen)
	Mond	Spraak aan / uit
	Schildpad	Spraak langzamer
	Haas	Spraak sneller
	Envelop	Open email programma
	Globe	Open webbrowser
	Pijl rechts	Vooruit (webbrowser)
	Pijl links	Terug (webbrowser)



Dolphin Toetsenbord met Grote Karakters



Toetsen met grote Karakters


- ✓ Grote Karakters met een hoog contrast
- ✓ 18 snel te vinden voelbare 'Snelknoppen'
- ✓ Ga sneller met SuperNova aan de slag
- ✓ Minder sneltoetsen te onthouden
- ✓ Ideaal voor mensen die niet blind kunnen typen

Dolphin Toetsenbord met grote karakters

Het Dolphin toetsenbord heeft grote gedrukte karakters, met een hoog contrast die gemakkelijker te zien zijn. Het Dolphin toetsenbord bevat ook 18 Snelknoppen voor snelle toegang tot de belangrijkste Dolphin software functies. Deze knoppen zijn groot en verschillen van vorm waardoor ze voelbaar zijn en eenvoudig te vinden met de vingers.

Met de Snelknoppen kunt u:

- ✓ SuperNova starten
- ✓ Het regelpaneel van Dolphin weergeven voor toegang tot alle functies
- ✓ Help functie starten
- ✓ De vergroting instellen
- ✓ Schakelen tussen kleuren schema's
- ✓ De Spraak snelheid instellen
- ✓ Benaderen van online diensten, zoals: nieuws, radio, weerbericht en podcasts

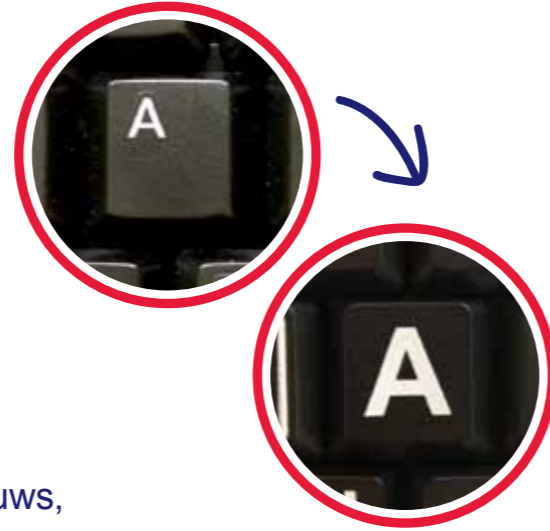

Een overzicht van de Snelknoppen vindt u aan de achterkant van deze brochure.

Wat u nodig heeft

Het Dolphin Toetsenbord met grote karakters wordt aanbevolen bij het gebruik van SuperNova versie 13.5 of later. Als u reeds de laatste Dolphin software heeft geïnstalleerd zijn instellingen niet nodig, plug eenvoudig uw Dolphin toetsenbord in via een USB kabel en start onmiddellijk!

Het Dolphin toetsenbord werkt met computers die gebruik maken van de besturingssystemen Windows 8, Windows 7 of Windows XP.

Het Dolphin toetsenbord kan ook worden gebruikt zonder dat de Dolphin SuperNova software draait, alleen de 'Snelknoppen' werken dan niet. De andere toetsen werken als gebruikelijk.

Garantie

Uw Dolphin toetsenbord heeft 12 maanden garantie op fabricage fouten. Als u een denkt dat er een probleem is, neem dan direct contact met ons op met de vermelding waar en wanneer u het gekocht heeft.

We zullen een toetsenbord met een fabrieksfout graag vervangen. We zullen een toetsenbord dat onoordeelkundig gebruikt is of beschadigd is echter niet vervangen.



Onderhoud van uw toetsenbord

Onderhoud uw toetsenbord goed. Voor het schoonmaken verwijdt u eerst de kabel uit de computer. Maak het schoon met een droge doek of een zachte borstel. Als u drank over het toetsenbord krijgt, verwijder dan de kabel, droog de vloeistof, keer het om en laat het drogen. Zodra het gedroogd is, maak het schoon met een vochtige doek om kleven te voorkomen.

Het complete pakket?

De Dolphin leverancier biedt een reeks klaar-voor-gebruik computer en laptop pakketten met de Dolphin software reeds geïnstalleerd en alle gewenste accessoires.

Voor meer hulp en adviezen kunt u contact opnemen met Dolphin of uw lokale leverancier.

Zoek uw lokale leverancier op:
www.YourDolphin.com/dealers



Vragen?

Stuur ons een email: info@yourdolphin.com

Info op aanvraag beschikbaar in grootdruk of Braille van de Dolphin website.

www.YourDolphin.com